

Brochure per il paziente

Impianti dentali

Una sintesi chiara e concisa di tutte le informazioni
sugli impianti dentali



Care lettrici, cari lettori,




Una dentatura sana non è purtroppo una condizione scontata.

Giovani o anziani, nessuno è immune dalla perdita dei denti come conseguenza di malattie di denti e gengive o in seguito a un incidente. In questi casi gli impianti dentali possono offrire una valida soluzione.


Fondato su basi scientifiche piuttosto che sulle tendenze, il sistema implantare Thommen Medical è incentrato su un design

esclusivo e collaudato, ottimizzato per il successo clinico nel corso di oltre tre decenni. Ci concentriamo su un portafoglio di soluzioni sperimentate che garantiscono sicurezza e affidabilità.

In questo opuscolo troverai una sintesi di tutte le informazioni utili sugli impianti dentali. Parlane con il tuo dentista.

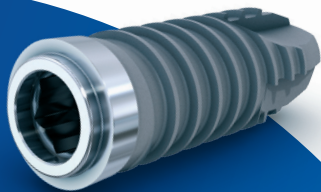

Che cosa è un impianto dentale?

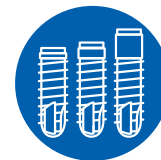


L'implantologia dentale è ormai diventata una delle terapie standard in odontoiatria e si basa su solide fondamenta scientifiche.

Il dente naturale è composto da una corona dentale e una radice. Un impianto dentale è una radice (del dente) artificiale, che viene inserita in anestesia locale direttamente nell'osso mascellare, per sostituire il dente perso con una corona implantare fissata sull'impianto.

I vantaggi degli impianti dentali

- Ripristinano la funzione e l'estetica dei denti mancanti
- Assicurano una ritenzione sicura e resistente
- Sembrano i tuoi denti naturali
- Preservano i tuoi denti naturali
- Fungono da ancoraggio per corone dentali modellate su misura

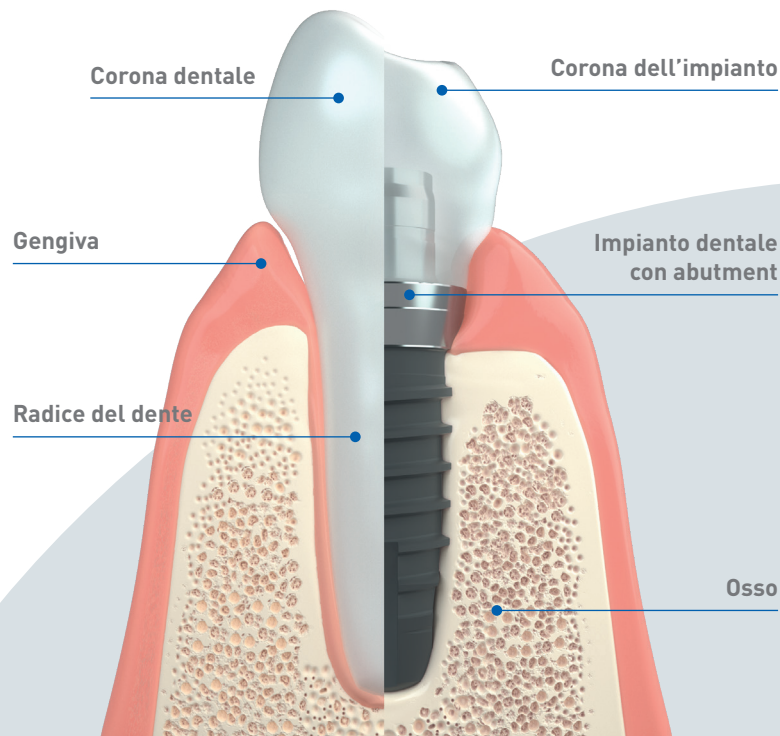

Perché sostituire i denti mancanti?



La mancanza di denti limita le nostre capacità in molti modi. Le edentulie determinano un peggioramento delle condizioni dentali generali e possono influenzare negativamente l'alimentazione, la fonazione, il sorriso, la salute e il benessere. I denti mancanti vengono sostituiti principalmente per motivi **funzionali, estetici e sanitari**.

La scelta della protesi dipende principalmente dal numero e dalla posizione dei denti mancanti e dalle condizioni dei denti adiacenti. Oltre agli impianti dentali esistono altre soluzioni per sostituire i denti, come le protesi totali rimovibili o i ponti fissi.





Per motivi funzionali

Per garantire la stabilità grazie agli impianti dentali – l'eloquio diventa più chiaro, la masticazione più efficace.



Per ragioni estetiche

Per sorridere con sicurezza – senza limitazioni.



Per motivi di salute

Per migliorare il tuo benessere – grazie a una dentatura sana.

I fondamenti della terapia individuale



Esistono due tipi di trattamento
con impianti.

Parla con il tuo dentista per trovare
insieme la soluzione migliore per te.



Soluzioni fisse

Sono impiantate da un dentista e possono essere rimosse soltanto da un dentista.




Soluzioni mobili


Possono essere inserite e rimosse per l'igiene orale quotidiana dal paziente stesso.

Restauro di un dente singolo


Il trattamento con impianti dentali è sempre una soluzione personalizzata. Se manca un solo dente l'impianto viene inserito esattamente in quel punto e la corona viene adattata con precisione alle esigenze estetiche.

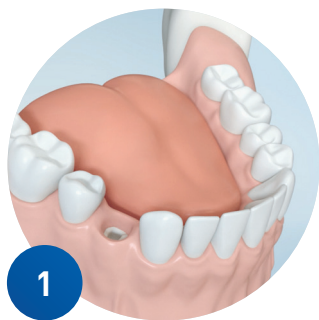


Situazione iniziale:
edentulia risultante dalla
mancanza di un singolo
dente.

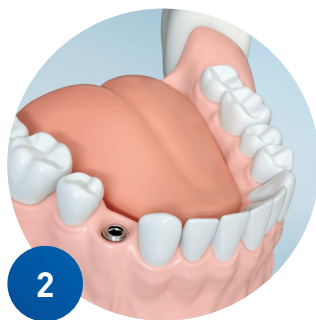

Viene inserito l'impianto.

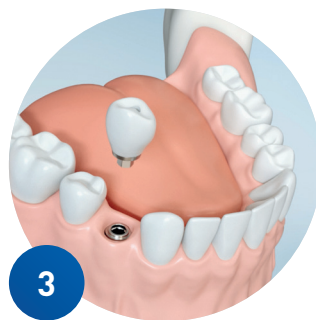

La corona implantare viene
fissata sull'impianto.

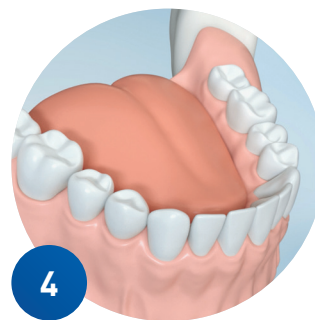


Risultato a conclusione del
trattamento.

Sostituzione di più denti


Se vi è una perdita di più denti, gli impianti possono fungere da pilastri per un ponte. In questo caso spesso non è necessario sostituire ciascun dente mancante con un impianto.




Situazione iniziale:
mancanza di tre denti.

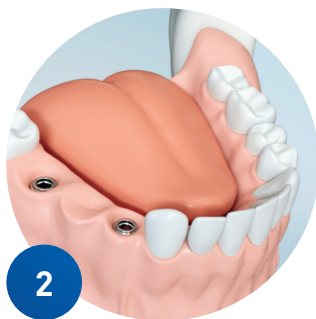

Vengono inseriti due impianti
per l'ancoraggio.

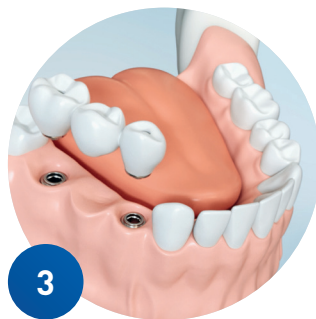


Un ponte (composto da tre
denti) viene fissato sui due
impianti inseriti.

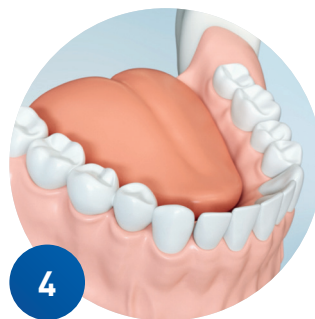


Risultato a conclusione del
trattamento.

Sostituzione di tutti i denti – protesi fissa


Anche nella sostituzione di tutti i denti vengono utilizzati impianti che fungono da pilastri, per garantire alla protesi un saldo posizionamento.

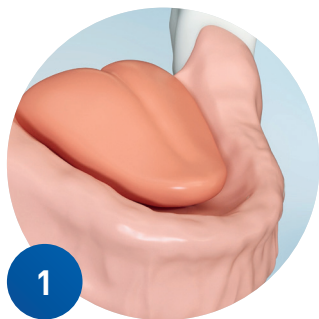


Situazione iniziale:
mancano tutti i denti
dell'arcata.

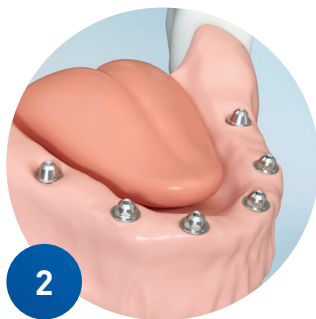

Gli impianti vengono applicati
in modo tale da poter offrire
un supporto ottimale per il
ponte. Sugli impianti vengono
fissati gli abutment.

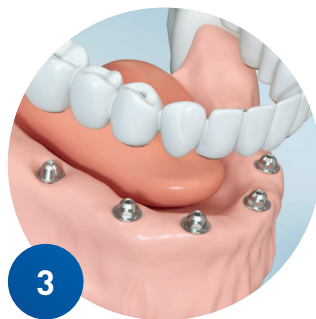


Il ponte fisso viene avvitato
saldamente dal dentista sugli
abutment.

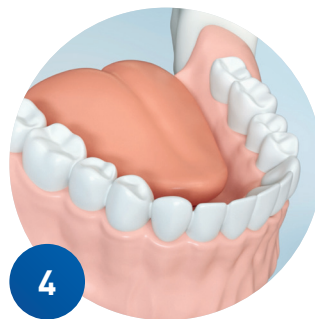


Risultato a conclusione del
trattamento.

Sostituzione di tutti i denti – protesi mobile

Rimovibile. A differenza della versione fissa, in questo caso il paziente può rimuovere la protesi totale. Gli impianti sono dotati di un elemento di supporto (barra, bottone a pressione o equivalente) su cui viene fissata la protesi. Per la pulizia quotidiana, il paziente può rimuovere la protesi con poche semplici manovre.

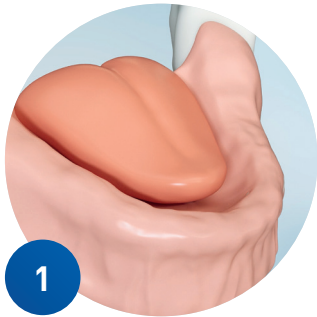


Situazione iniziale: mancano tutti i denti dell'arcata.

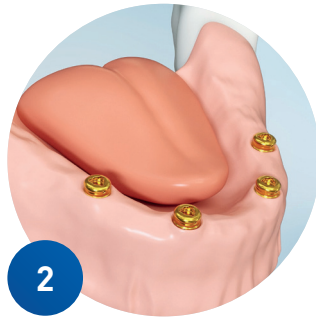

Gli elementi di supporto vengono applicati sugli impianti ai fini della necessaria stabilità.



Il paziente può inserire ed estrarre la protesi autonomamente.

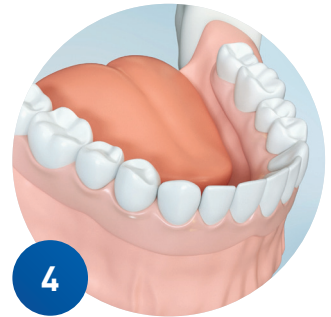

Risultato a conclusione del trattamento.

Trattamento implantare

Passo dopo passo

Per il trattamento implantare in genere sono sufficienti solo poche sedute. Ogni trattamento implantare, indipendentemente dal tipo di protesi, prevede le stesse fasi.

1

Diagnosi



2

Pre-trattamento



3

Impianto




4

Inserimento



5

Cura e mantenimento

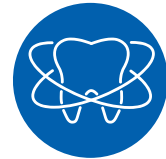

1. Diagnosi

Per il successo del trattamento è importante considerare complessivamente la situazione iniziale, le aspettative del paziente e le possibili strategie di trattamento. A questo scopo vengono eseguite radiografie e prese dell'impronta.

Qualsiasi intervento chirurgico comporta dei rischi; non sono prevedibili delle possibili complicanze. Pertanto sono **sempre indispensabili la consulenza e la visita accurata da parte del dentista.**

I rischi di un impianto dentale possono essere valutati prima di un intervento, ma non possono essere completamente esclusi.

Ad esempio, una scarsa igiene orale o la presenza di malattie (ad es. osteoporosi, diabete) possono compromettere la guarigione della ferita.





- 1 Situazione iniziale
- 2 Analisi e pianificazione del trattamento
- 3a Impronta convenzionale
- 3b Impronta digitale




2. Pre-trattamento



Per il successo a lungo termine di un trattamento implantare è necessario di norma eseguire alcune procedure preliminari all'impianto.

- 4 Pre-trattamento
- 5 Esposizione della membrana mucosa e intervento di rialzo dell'osso, se necessario

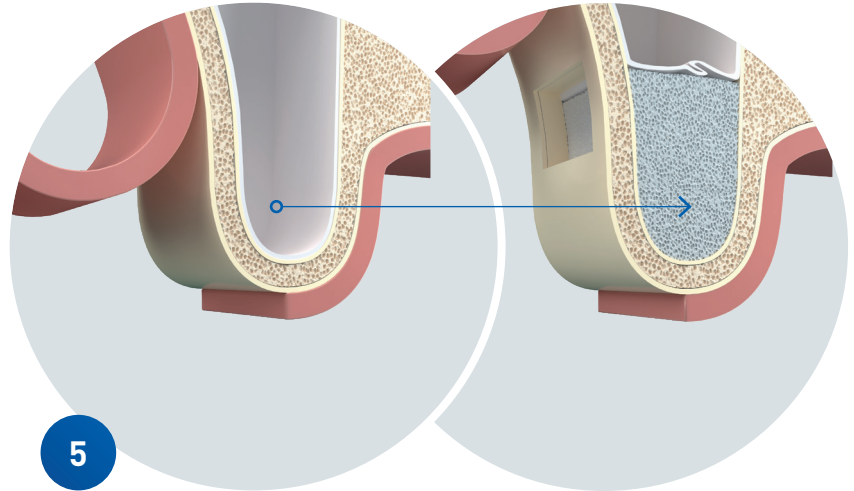

3. Impianto



L'implantologia rappresenta ormai una delle terapie standard in odontoiatria. Grazie ai moderni metodi di anestesia e di impianto, il trattamento può essere effettuato in modo rapido e sempre meno invasivo. Durante la fase di guarigione, l'impiego di una protesi

provvisoria può aiutare a modellare la gengiva in modo da ottenere un aspetto naturale. Parla con il tuo dentista per farti spiegare i processi biologici connessi all'impianto e tutti gli aspetti da considerare prima e dopo il trattamento.




- 6 Inserimento dell'impianto
- 7 La gengiva viene modellata con l'aiuto di un restauro provvisorio

4. Inserimento



Nella fase successiva all'inserimento, l'impianto dentale viene inglobato nell'osso (osteointegrazione) e si crea una connessione solida tra osso e impianto.
Al termine dell'osteointegrazione, la protesi provvisoria viene sostituita dalla protesi definitiva.

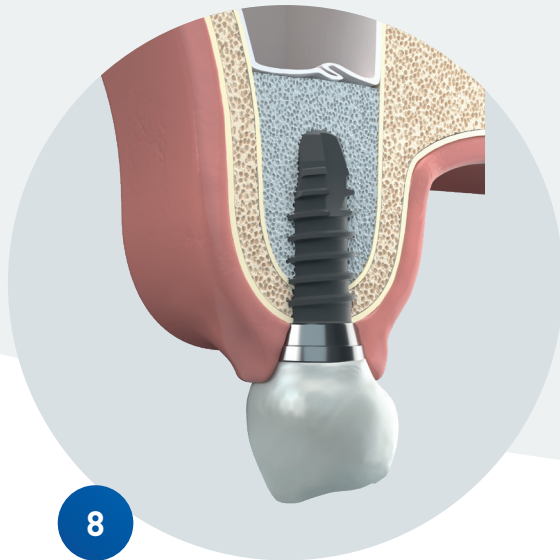

8

8 Il restauro provvisorio viene sostituito con la corona dentale definitiva

5. Cura e mantenimento



Una scrupolosa e accurata igiene orale, regolari pulizie dentali professionali e controlli da parte del dentista sono fattori decisivi per il successo a lungo termine di una protesi implantare. Richiedi al tuo dentista una consulenza dettagliata in merito.



9

9 Visita di controllo e cura dell'impianto

Cosa puoi aspettarti in quanto paziente?

La sicurezza dei pazienti rappresenta una priorità per Thommen Medical. In collaborazione con dentisti di spicco e rinomate istituzioni accademiche a livello internazionale, sviluppiamo prodotti innovativi con l'obiettivo di ottenere risultati clinici della massima qualità.



I vantaggi in breve

Swiss made

Prodotti di altissima qualità, realizzati nel nostro stabilimento di Grenchen.

Soluzioni Premium

Il portafoglio Thommen Medical copre l'intero spettro di soluzioni ottimali.

Concetto intelligente

Il paziente può contare su un concetto di prodotto ottimamente documentato dal punto di vista scientifico.

Realizzati ad hoc

Offriamo soluzioni su misura per le esigenze individuali e la disponibilità economica di ognuno.

Thommen Medical

Driven by science, not trends

Anche dopo oltre 35 anni di esperienza clinica, Thommen Medical continua a promuovere il settore ricerca e sviluppo in stretta collaborazione con dentisti e odontotecnici di spicco nonché con rinomate istituzioni accademiche a livello internazionale, con l'obiettivo di garantire a ogni paziente l'accesso alla migliore soluzione protesica disponibile.

Dentisti e odontotecnici scelgono il sistema implantare Thommen Medical perché apprezzano la qualità e si preoccupano della salute orale dei pazienti.

I prodotti Thommen sono fabbricati in Svizzera secondo i più alti standard qualitativi e possono offrire una migliore qualità della vita – **per tutta la vita.**

Parla con il tuo dentista e verificate insieme la soluzione migliore per te. Fatti spiegare i processi biologici connessi all'impianto e tutti gli aspetti da considerare prima e dopo il trattamento.

Per farsi un'idea dei prodotti e per ulteriori informazioni sugli impianti dentali:



Eseguire la scansione del codice QR per: thommenmedical.com

Disclaimer

Queste informazioni per i pazienti sono una presentazione semplificata allo scopo di fornire consigli e informazioni; non pretendono di essere un supporto didattico per odontoiatri o professionisti del settore.

Il tuo dentista

Driven by science, not trends.